

Flocare[®] 800 pumpe

Enteral ernæringspumpe til stasjonært bruk.

Flocare[®] 800 pumpe er en peristaltisk enteral ernæringspumpe for kontinuerlig og jevn tilførsel av sondeernæring. Batteridrift ved strømbrydd eller ambulant bruk. Audio- og visuelle alarmfunksjoner sørger for trygg bruk.

Flocare[®] 800 pumpe skal kun brukes sammen med Flocare[®] 800 sett.



Bestillingsinformasjon: Denne pumpen er ikke lenger til salgs.

Flocare® 800 pumpe

Indikasjon: Til administrasjon av sondeernæring ved kontrollert hastighet.
En enteral ernæringspumpe bør alltid brukes ved tilførsel av sondeernæring direkte i tynntarmen, ved korttarm syndrom og ved risiko for aspirasjon.

Tilstander som diaré, kvalme/brekninger og redusert mavekapasitet kan også hjelpes ved å administrere sondeernæringen med en enteral ernæringspumpe. Enteral ernæringspumpe anbefales ved tilførsel av sondeernæring om natten, ved oppstart av enteral ernæring og ved overgang til sondeernæring med høy energitetthet.

Advarsel: Flocare® 800 pumpe skal kun brukes til administrasjon av enteral ernæring.
Må ikke brukes i områder hvor det er brannfare, f.eks. sammen med narkosemidler.

Tekniske data:

- Flow-rate fra 1-300 ml/t i 1 ml intervaller.
- Viser gitt volum og den endelige dosering.
- Minne for gitt volum.
- 3-timers batteridrift. Oppladningstid: 12-16 timer. Automatisk oppladning når pumpen er koplet til strømnettet. Automatisk skift til batterienhet ved strøbrudd.
- Audio-visuelle alarmer for:
 - Dose Komplet – når den foreskrevne dose er gitt
 - Okklusjon
 - Lavt batteri
 - “Hold time out” – advarer mot at ernæringstilførsel er brutt når “Hold” er aktivert mer enn 3 1/2 min
 - Malfunksjon – automatisk kontroll av pumpens interne mekaniske funksjoner
- Presisjon: ±10 %.
- Vekt: ca. 2,5 kg.

Må kun brukes med Flocare® 800 sett.

Fullstendig brukermanual følger med pumpen.