

Flocare® Bengmark® naso-intestinal sonde

Enteral naso-intestinal ernæringssonde med spiral distalt for tilførsel direkte i duodenum eller jejunum.

Flocare® Bengmark® naso-intestinal sonde har en unik spiral på den distale enden som fremmer spontan transpylorisk passasje til tynntarmen. Spiralen bidrar til fiksering av sonden i tynntarmen. Dersom motiliteten i ventrikkelen ikke fungerer, kan Flocare® Bengmark® naso-intestinal sonde plasseres ved hjelp av endoskopi.



Bestillingsinformasjon:

	Apotekbransjens varenr.	Salgsenhet til apotek/sykehus
Flocare® Bengmark naso-intestinal sonde Ch 8/145 cm (blå)	993014	1 sett
Flocare® Bengmark naso-intestinal sonde Ch 10/145 cm (sort)	993022	1 sett

Flocare® Benchmark® naso-intestinal sonde består av:

- A: Universal konnektor i polyuretan
- B: Hvit, røntgentett sonde i polyuretan
- C: Avstandsmarker for hver 10 cm fra distalenden
- D: Lukket sondespiss med Hydromer Coating og 4 laterale åpninger
- E: Mandreng innsatt med silikonolje

Størrelser: Ch 8 og 10.


Indikasjon: Ved behov for sondeernæring direkte i duodenum eller jejunum. Det kan være aktuelt for pasienter med en fungerende tynntarm, men nedsatt funksjon i magesekken eller økt risiko for aspirasjon.

Kontraindikasjoner: Ikke fungerende tarm, ileus, metabolske koma, øsofagusvaricer eller -blødninger, akutt abdomen.

Holdbarhet: 60 måneder fra produksjonsdato. Holdbarhetsdato på pakningen.

Oppbevaring: Lagres ved romtemperatur.

Brukstid: Ca. 6-8 uker, men brukstid er vanskelig å angi da det kan variere mye avhengig bl.a. av mengde magesyre, medisiner og type sondeemat som gis. Bytt nesebor når Flocare® Benchmarksonden skiftes.

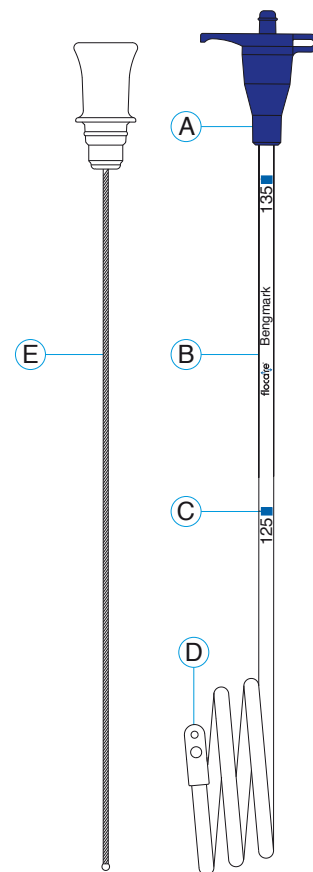

Brukerveiledning Flocare® Benchmark® naso-intestinal sonde:

Nedleggelse:

Det følger bruksanvisning med sonden for nedleggelse på følgende måter:

- Ved bruk av pasientens egen ventrikkelmotilitet*
- Ved bruk av røntgenkontroll når ventrikkelmotilitet er fraværende
- Ved bruk av endoskopi når ventrikkelmotilitet er fraværende

** Til pasienter som skal gjennomgå et kirurgisk inngrep, anbefales Flocare® Benchmarksonde nedlagt 24 t før inngrepet da ventrikkelmotilitet vanligvis er nedsatt etter kirurgi.*

Ved mating:

1. Det anbefales at sondeernæring administreres ved hjelp av en enteral ernæringspumpe, f. eks. Flocare® Infinity™ eller Flocare® 800.
2. Skyll med 20-40 ml vann før og etter bruk, eller minimum hver 8. time for å unngå at sonden tetter seg.

Ved fjerning av Flocare® Benchmark® naso-intestinal sonde:

Skyll sonden med litt vann. Sett proppen i universalkonnektoren for å unngå at resterende væske i sonden kan komme i lungene. Trekk forsiktig ut Flocare® Benchmarksonden.