

Flocare® Top-fill reservoar 1,3 l

Flocare® Container 500 ml

Engangsbeholdere for tilførsel av sondeernæring eller væske. Kun til enteralt bruk.

De ulike Flocare® sterile beholdere kan benyttes til så vel sondeemat som ekstra væske. Korken til beholderene er nå farget lilla som en del av Nutricias kampanje for å øke skillet mellom parenteralt og enteralt bruk.

Kan anvendes sammen med Flocare® ernæringssett til Pack (Nutricias poser). Velg sett i henhold til type administrasjon.

Flocare® Infinity™ Pack sett

(Nutricias varenr. 35158, Apotekbransjens varenr. 898895)

Flocare® Micromax Pack sett


(Nutricias varenr. 35148, Apotekbransjens varenr. 854349)

Flocare® 800 Pack sett

(Nutricias varenr. 35147, Apotekbransjens varenr. 854265)


Flocare® gravity Pack sett

(Nutricias varenr. 35146, Apotekbransjens varenr. 854067)

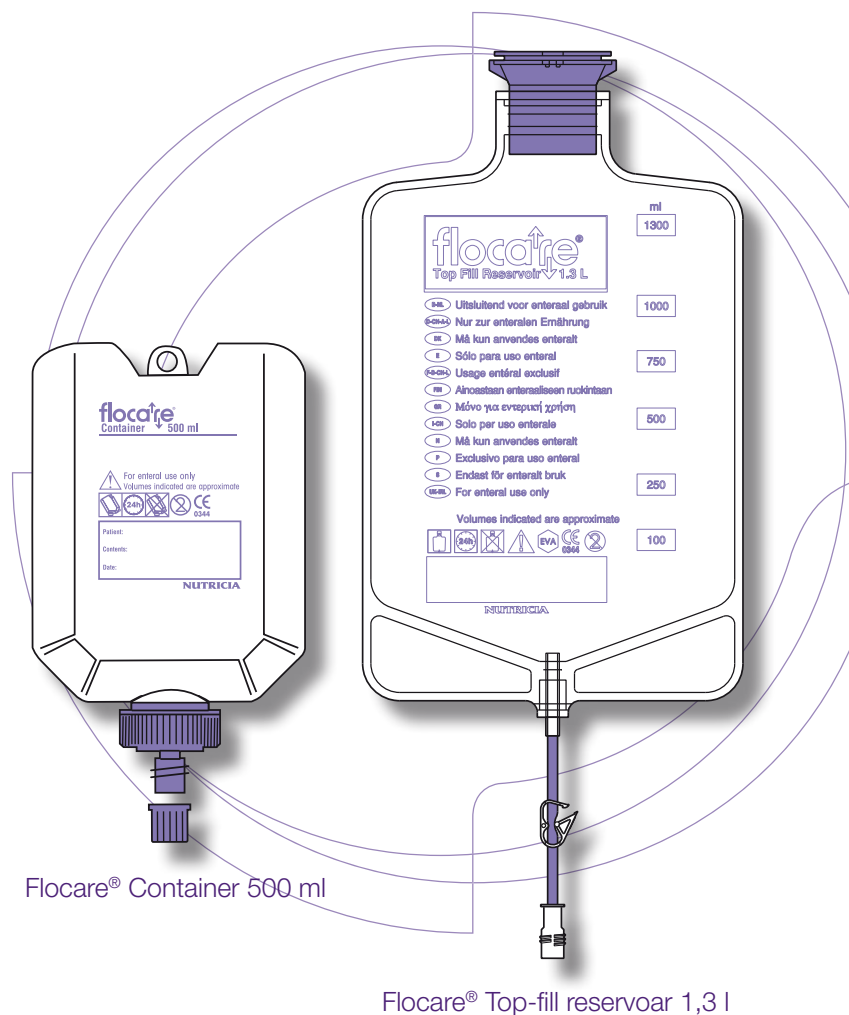

Bestillingsinformasjon:

	Nutricias varenr.	Apotekbransjens varenr.	Salgsenhet til apotek/sykehus
Flocare® Top-fill reservoar 1,3 l	35732	978999	1 x 10 stk.
Flocare® Container 500 ml	35746	936429	1 x 10 stk.

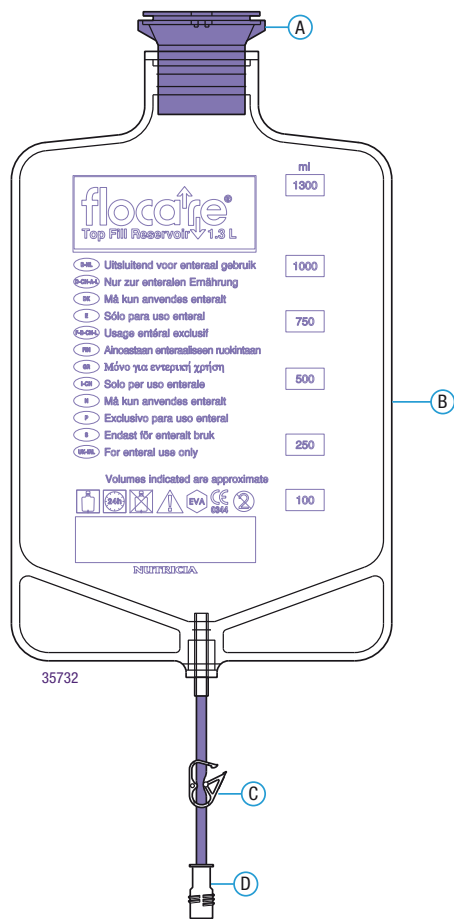


Flocare® Top-fill reservoir 1,3 l består av:

- A: Lokk og fyllingsinngang.
- B: Beholder med volummål.
- C: Stoppeklemme.
- D: Konnektor for kobling til sett.

Volum: 1,3 liter.

Materiale: Etylenvinylacetat (EVA).

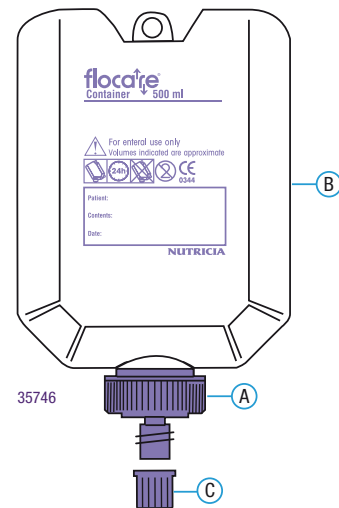

Flocare® Container 500 ml består av:

- A: Lokk og fyllingsinngang.
- B: Beholder med volummål.
- C: Skrukork som beskytter koblingskonnektor.

Volum: 500 ml.

Materiale: Polyeten med lav tetthet (LDPE).

Emballasje: Enkeltvis sterilt pakket.

Anbefalt hengetid: Maksimum 24 timer.
Anbefalt hengetid for tillaget eller etterfylt sondeernæring er 4 timer i romtemperatur.

Merk! Type innhold, ernæringssystemets design, prosedyrer, miljøet rundt tillaging og administrering av maten vil være avgjørende med henhold til kontaminasjon og bakterievekst. Dette betyr at hengetiden må vurderes i hvert enkelt tilfelle utifra disse punktene. Ved behov for rådføring med hensyn til hygiene, anbefaler vi å kontakte sykehusets hygieneavdeling.

Holdbarhet: 36 måneder. Holdbarhetsdato på pakningen.

Oppbevaring: Lagres ved romtemperatur.