

Flocare® Infinity™ pumpe

Enteral ernæringspumpe til ambulant eller stasjonært bruk.

Flocare® Infinity™ pumpe er basert på roterende peristaltiske prinsipp. Utstyrt med automatisk fri-flyt beskyttelse og audio- og visuelle alarmfunksjoner som sørger for trygg bruk. Pumpens lilla farge, sammen med tilhørende lilla administrasjonssett og lilla skrukork på posene til Nutricias sondeløsninger, bidrar til å skille enteralt utstyr fra parenteralt.

Flocare® Infinity™ pumpe skal kun brukes sammen med Flocare® Infinity™ sett.

Flocare® sekkene skal brukes sammen med Flocare® ramme til sekk. Flocare® ramme til sekk kan også fungere som et lite bordstativ.



Flocare® sekk for voksne

Flocare® ramme til sekk

Flocare® sekk for barn

Flocare® bordstativ

Bestillingsinformasjon: Bestilles direkte fra Nutricia eller bandagist.

	Nutricias varenr.	Salgsenhet
Flocare® Infinity™ pumpe	35682	1 stk.
Flocare® sekk for voksne	35785	1 stk.
Flocare® ramme til sekk	35783	1 stk.
Flocare® sekk for barn	35786	1 stk.
Flocare® bordstativ	35782	1 stk.

Flocare® Infinity™ pumpe

Indikasjon: Til administrasjon av sondeernæring ved kontrollert hastighet.

En enteral ernæringspumpe bør alltid brukes ved tilførsel av sondeernæring direkte i tynntarmen, ved korttarm syndrom og ved risiko for aspirasjon.

Tilstander som diaré, kvalme/brekninger og redusert mavekapasitet kan også hjelpes ved å administrere sondeernæringen med en enteral ernæringspumpe. Enteral ernæringspumpe anbefales også ved oppstart av enteral ernæring, ved tilførsel av sondeernæring om natten og ved overgang til sondeernæring med høy energitetthet.

Advarsel: Flocare® Infinity™ pumpe skal kun brukes til administrasjon av enteral ernæring.

Teknisk data:

- Dose/volum: 1 - 4000 ml.
- Infusjonshastighet: 1-400 ml/t i trinn på 1 ml.
- Evighetsminne for innstilt program og gitt volum. Kan nullstilles.
- Litium-ion batteri med 24 timers kapasitet ved 125 ml/t.
Oppladningstid er ca. 6 timer.
- IPX 5: Kan vaskes under rennende vann.
- Justerbare innstillinger for:
 - alarm volum: høyt/lavt
 - tastatur: låst/ulåst
 - alarm eller stum når innstilt dose er gått inn
 - lys: på/av
- Nøyaktighet: ± 5%.
- Vekt: 392 g.
- Størrelse: 14 x 9,5 x 3,5 cm.
- Service sjekk: kun hvert 2 år.

Må kun brukes med Flocare® Infinity™ enterale ernæringssett.

Fullstendig norsk brukermanual og kortfattet bruksanvisning/problemløser følger med pumpen.

Interaktiv trening med online virtuell pumpe finnes på svensk og engelsk på www.flocareinfinity.com.